



ANWENDUNGSHINWEISE BARCODE-ETIKETTEN MUSTER 10A (VERSION BD)

Das Auftragsetikett wird auf die Vorderseite des Anforderungsscheins geklebt und die Anzahl der dazugehörigen Probengefäße eingetragen.


Dieses Etikett wird in das Labor-Journal geklebt. Es enthält die Auftragsnummer und die DFÜ-ID, mit der Sie die Befunde elektronisch abrufen können.

EKT223C2	EKT223C6	EKT223C5
EDTA	NaF/Heparin	Material:
EKT223C3	EKT223C4	EKT223C5
Serum / Vollblut	Urin	Material:
EKT223C1	EKT223C3	EKT223C5
Serum / Vollblut	Citrat	Material:


Auftragsnummer: EKT 223C
 DFÜ-13223
 Laborgemeinschaft
 Laborauftrag
 Dieses Etikett ist für Ihr Labor-Journal
 Auftrag: EKT223C Pat.-Name
 DFÜ-ID: 13223

Das Etikett Serum/Vollblut können Sie für beide Materialien verwenden. Bitte kennzeichnen Sie uns lediglich, um welches Material es sich handelt (z. B. durch Unterstreichen).

Diesen Barcode für TSH nach TRH (Stimulation) verwenden!

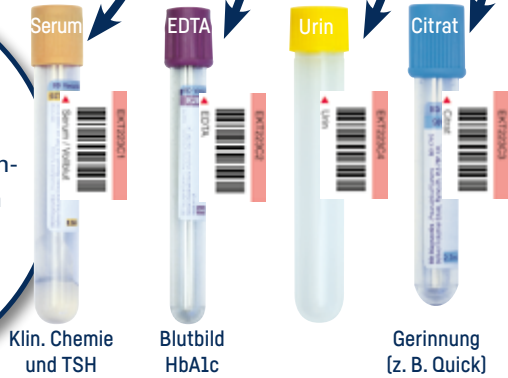

Blutzucker-/ Glucose-Röhrchen mit Glucose-Stabilisator nur für Glucose-Bestimmung verwenden! Die Etiketten von 1 bis 4 durch nummerieren.

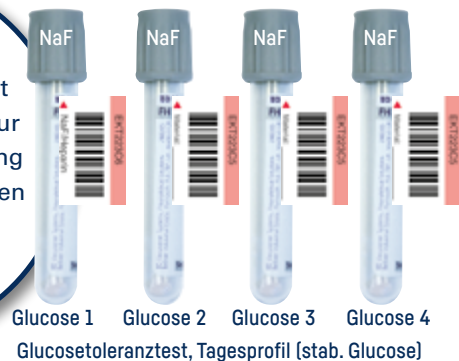

Bitte darauf achten,

- dass die Etiketten mit dem Markierungspfeil nach oben auf die Röhrchen geklebt werden.
- dass die Barcode-Etiketten in Höhe des oberen Randes der vorhandenen Etiketten geklebt werden.
- dass pro Patient/Auftrag nur Barcodes aus einem Etiketten-Blatt verwendet werden.
- dass Sie auf alle Begleitformulare einen Barcode kleben. Nutzen Sie hier einen noch nicht verwendeten Barcode.