




**BIOSCIENTIA**

Medizin. Labor. Service.


# Anwendungshinweise Barcode-Etiketten Muster 10 (Version Sarstedt)

Das Auftragsetikett kleben Sie auf die Vorderseite des Überweisungs-/Privatauftragscheins und tragen die Anzahl der Probengefäße ein.

Dieses Etikett wird in das Labor-Journal geklebt. Es enthält die Auftrags-Nummer und die DFÜ-ID, mit der Sie die Befunde elektronisch abrufen können.

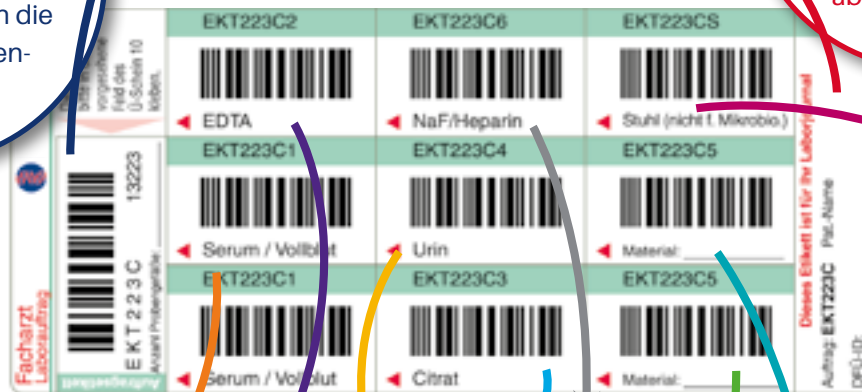

Das Etikett Serum/Vollblut können Sie für beide Materialien verwenden. Bitte kennzeichnen Sie uns lediglich, um welches Material es sich handelt (z. B. durch Unterstreichen).

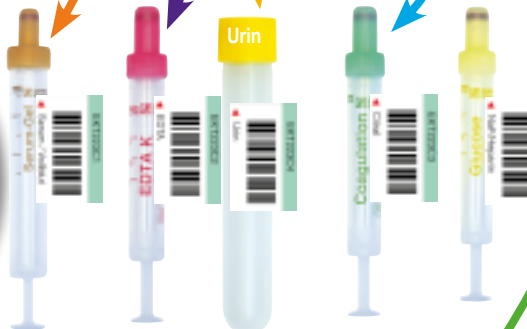

Nur für Darmkrebsvorsorge

Bitte verwenden Sie die Etiketten ohne Materialangabe für Proben für die Mikrobiologie. Hier müssen Sie das entnommene Probenmaterial eintragen.

Stimulationstest:  
Bitte verwenden Sie hierfür die Etiketten ohne Materialangabe (Glucosetoleranztest, TRH-Test) und beschriften Sie sie mit dem Material und der Abnahmezeit z. B. Serum 0, Serum 1 h, Serum 2 h für den Glucosetoleranztest).

Bitte darauf achten,

- dass die Etiketten mit dem Markierungspfeil nach oben auf die Röhren geklebt werden.
- dass die Barcode-Etiketten in Höhe des oberen Randes der vorhandenen Etiketten geklebt werden.
- dass pro Patient/Auftrag nur Barcodes aus einem Etiketten-Blatt verwendet werden.
- dass Sie auf alle Begleitformulare einen Barcode kleben. Nutzen Sie hier einen noch nicht verwendeten Barcode.