



BIOSCIENTIA

Medizin. Labor. Service.

Anwendungshinweise Barcode-Etiketten Muster 10A (Version Sarstedt)


Das Auftragsetikett kleben Sie auf die Vorderseite des Anforderungsscheins und tragen die Anzahl der Probengefäße ein.

Dieses Etikett wird in das Labor-Journal geklebt. Es enthält die Auftrags-Nummer und die DFÜ-ID, mit der Sie die Befunde elektronisch abrufen können.



Das Etikett Serum/Vollblut können Sie für beide Materialien verwenden. Bitte kennzeichnen Sie uns lediglich, um welches Material es sich handelt (z. B. durch Unterstreichen).

Diesen Barcode für TSH nach TRH (Stimulation) verwenden!

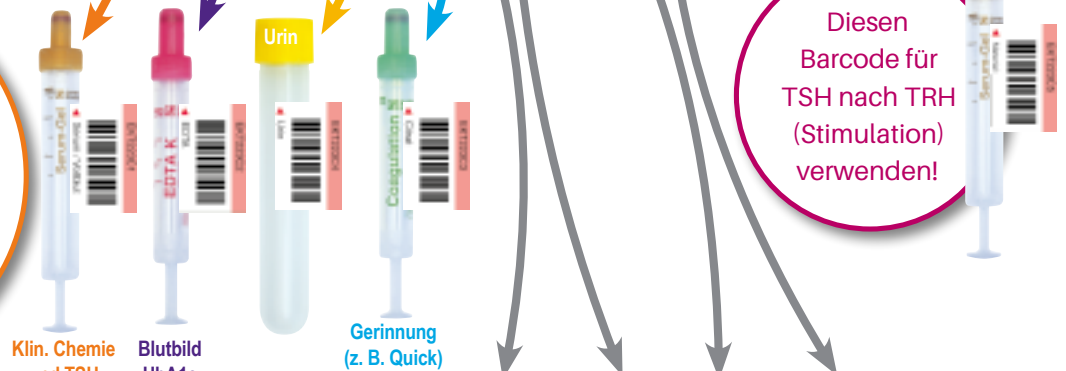

Glucose-Röhrchen mit Glucose-Stabilisator nur für Glucose-Bestimmung verwenden! Die Etiketten von 1 bis 4 durch nummerieren.



Bitte darauf achten,

- dass die Etiketten mit dem Markierungspfeil nach oben auf die Röhrchen geklebt werden.
- dass die Barcode-Etiketten in Höhe des oberen Randes der vorhandenen Etiketten geklebt werden.
- dass pro Patient/Auftrag nur Barcodes aus einem Etiketten-Blatt verwendet werden.
- dass Sie auf alle Begleitformulare einen Barcode kleben. Nutzen Sie hier einen noch nicht verwendeten Barcode.