



**BIOSCIENTIA**

Medizin. Labor. Service.

## VeriSeq-NIPT - So einfach geht's

**1**

Der schwangeren Frau  
7 bis 10 ml Blut entnehmen.


**NEU:**

Nur noch ein  
Röhrchen pro  
Auftrag nötig.



**2**

Anschließend das  
VeriSeq-Röhrchen  
10 x vorsichtig überkopf  
schwenken (nicht schütteln).

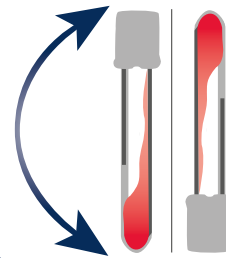

**3**

Die Blutprobe  
mit ausgefülltem  
Anforderungsschein in  
eine der beiliegenden  
Versandtüten packen und an  
Bioscientia schicken oder  
unserem Kurierdienst  
mitgeben.

**4**

Das Testergebnis  
liegt in der Regel nach  
3 bis 5 Werktagen vor.



Weitere  
Röhrchen und  
Informationsunterlagen  
können Sie über unser  
Bestellformular  
anfordern.