

Anwendungshinweise für die Untersuchung auf *Candida albicans*/spp.

Probenvorbereitung


- Entnehmen Sie den Tupfer aus der Verpackung, entfernen Sie den Deckel vom Transportröhrchen (mit Gel). Drehen Sie den Tupfer an der betroffenen Stelle, um eine ausreichende Menge an Material zu gewinnen. (Lässt dies das Schmerzempfinden des Patienten nicht zu, bewegen Sie den Tupfer über die betroffene Stelle.)
- Führen Sie den Tupfer anschließend in das Röhrchen, so dass sich die Wattespitze vollständig im Gel befindet. Prüfen Sie, ob das Röhrchen fest verschlossen ist.
- Kleben Sie einen Barcode auf das Röhrchen (s. Abbildung) und stecken Sie dieses in das im Entnahme-Set befindliche Umröhrchen.
- Legen Sie jetzt das Röhrchen, zusammen mit dem Anforderungsschein (Muster 10 s.u.), in die spezielle Versandtasche und verschließen Sie diese. Die so verpackte Probe senden Sie mit der Post zu uns ins Labor – wir übernehmen die Gebühr.

Muster 10

- Diese Untersuchung ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Für die Abrechnung benötigen wir das Muster 10. Liegt uns dieses nicht vor, muss die Untersuchung dem Patienten als Privatleistung in Rechnung gestellt werden.

Barcodes

- Damit es nicht zu Probenverwechslungen kommt, verwenden Sie bitte pro Patient nur Barcodes aus einem Etikettenblatt.

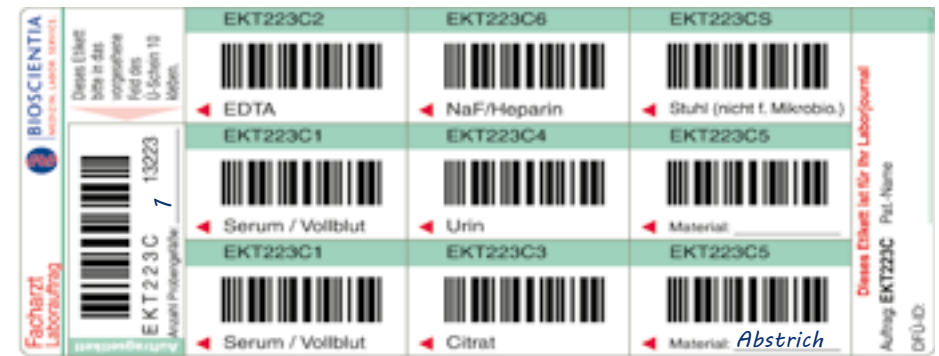

Das Auftragsetikett wird auf die Vorderseite des Muster 10 in das Feld „Auftragsnummer des Labors“ geklebt.

Zusätzlich wird die Anzahl der dazugehörigen Probengefäße auf dem Auftragsetikett eingetragen.

Nutzen Sie bitte das Etikett ohne Materialangabe. Geben Sie bei Material bitte „Abstrich“ an.

Bitte wie abgebildet das Röhrchen bekleben (mit dem roten Markierungspfeil nach oben).

